

Корсет поясничный полужесткой фиксации ПРР-21/2П

Особенности:

- высота 21 см
- 6 пластиковых ребер жесткости (4 для размера S)
- воздухопроницаемые влагоотводящие материалы
- цвет: бежевый

Показания к применению:

- умеренная фиксация поясничного отдела позвоночника
- профилактика, лечение и реабилитация после травм и операций
- люмбаго, люмбалгия
- миозит, остеохондроз, остеоартроз
- радикулиты, боли в поясничной области различной этиологии
- поясничный спондилез, остеоартрит
- грыжи Шморля
- легкая структурная недостаточность позвоночного столба
- статические нагрузки на поясничный отдел позвоночника
- после мануальной терапии и лечебной гимнастики
- профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Противопоказания:

- абсолютных противопоказаний не выявлено
- относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- осложнённые травмы позвоночника с повреждением спинного мозга
- необходимость индивидуального ортезирования позвоночника
- наличие в области применения ортопедического корсета контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие
- индивидуальная непереносимость, гнойничковая инфекция, открытые повреждения кожных покровов, локальные дерматиты различной природы.
- не рекомендуется надевать корсет после нанесения на кожу согревающих мазей и кремов

Рекомендации:

ручная стирка при t 30° C, стирать только с застегнутыми контактными липучками, не тереть и не выжимать изделие, сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов, не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку

Инструкция по применению:

- надевать на нижнее белье лежа на спине

Правила хранения:

- в помещениях с температурой от 10° до 25° C и относительной влажностью не более 75%
- вдали от источников тепла, пыли и прямых солнечных лучей

Состав:

- хлопок - 35%
- полиамид - 40%
- нейлон - 18%
- эластан - 7%

Гарантии:

Гарантий срок - 6 месяцев со дня продажи (при соблюдении рекомендаций по уходу)

Рекомендации по уходу

