

medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

Инструкция по применению
ортопедических изделий

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

0А-303



WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез Orlett на коленный сустав, арт. ОА-303, разгружает и снижает боль в колене благодаря возможности комплексно, с двух сторон, корректировать ось коленного сустава, что снимает нагрузку с пораженного мыщелка. Варус-вальгусную регулировку можно осуществлять в пределах 30 градусов. Ограничение диапазона движения в коленном суставе можно осуществлять в пределах: разгибание – 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; сгибание – 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°; иммобилизация – 0°, 10°, 20°, 30°.

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- остеоартроз коленного сустава III–IV степени;
- коррекция варусной/вальгусной деформации коленного сустава;
- послеоперационная реабилитация после хондропластики, рефиксации мениска, корригирующей остеотомии;
- прогностический тест перед клиновидной остеотомией бедра (брейс-тест);
- импрессионные переломы (большеберцовой кости).

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожи в области применения ортеза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

КОНСТРУКЦИЯ

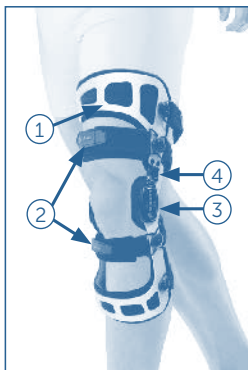


рис. 1.

Ортез Orlett, арт. ОА-303, на коленный сустав с полицентрическими шарнирами состоит из следующих элементов (цифры на рисунке соответствуют элементам конструкции):

1. Пластиковая рама.
2. Фиксирующие ремни на бедре и на голени.
3. Полицентрические шарниры.
4. Механизм варус-вальгусной регулировки.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

1. Расстегните все ремни с застежками велкро.
2. Установите на шарнире необходимый диапазон движения (см. порядок установки необходимого диапазона движения или угла сгибания-разгибания в шарнирах).
3. Расположите раму ортеза так, чтобы центр шарнира находился приблизительно на уровне верхнего края надколенника. При этом ортез окажется несколько выше, чем необходимо, однако при движении он займет правильное положение.
4. Застегните фиксирующие ремни.
5. Проведите необходимую варус-вальгусную регулировку, изменяя ось коленного сустава с помощью специального механизма и ключа-шестигранника (в комплекте ортеза). При регулировке необходимо руководствоваться субъективными ощущениями пациентом болевого синдрома.
6. Затяните все ремни так, чтобы ортез плотно облегал ногу, но при этом не вызывал дискомфорта.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать слишком сильно фиксирующие ремни во избежание нарушений кровообращения.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМОГО ДИАПАЗОНА ДВИЖЕНИЯ

1. Откройте защитную крышку (рис. 2).
2. С помощью набора ограничителей сгибания и разгибания (рис. 4) установите необходимый диапазон движения. Медиальный и латеральный шарниры должны иметь одинаковые установки.
3. Закройте защитную крышку.



рис. 2

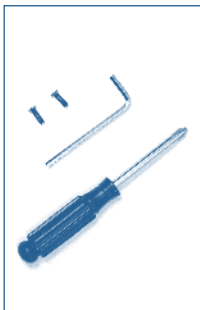


рис. 3

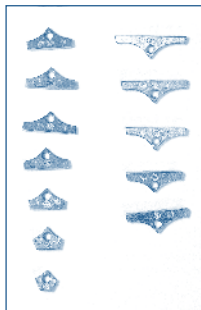


рис. 4

ВНИМАНИЕ!

Необходимый диапазон движений выставляется под контролем лечащего врача.

Самостоятельное и бесконтрольное изменение установок шарниров пациентом недопустимо.

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Для подбора ортеза Orlett на коленный сустав с регуляторами объема движения, арт. ОА-303, сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность бедра на уровне 15 см выше середины коленной чашечки и окружность голени на 12 см ниже середины коленного сустава. Согласно полученным данным подобрать ортез по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность бедра на 15 см выше середины коленного сустава, см	Окружность голени на 12 см ниже середины коленного сустава, см
S	39-47	29-37
M	47-54	37-43
L	54-60	43-50
XL	60-67	50-57

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Пластиковую раму ортеза можно протирать мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Перед стиркой съемные мягкие детали необходимо отстегнуть. Для мягких деталей предусмотрена машинная стирка в деликатном режиме при температуре не выше 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена.

Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. После высыхания мягкие детали пристегнуть к пластиковым частям боковых панелей и бедренной гильзы.



СОСТАВ

66% алюминий, сталь 5%, 1% цинк, 10% этиленвинилацетат, 6% нейлон, 5% полиэстер, 3% полипропилен, 3% спандекс, 1% поливинилхлорид.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. ОА-303, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-DE.НА38.В.00223/20 (с 17.03.2020 г. по 16.03.2023 г.) выдана ООО «Сервис Плюс».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

