

Корректор осанки усиленный для взрослых КК-02

Особенности:

- 2 моделируемых металлических съемных ребра жесткости
- 2 пластиковых коротких боковых ребра
- двойная стяжка
- нерастяжимые корректирующие регулируемые по длине ляжки (см. фото)
- мягкие накладки на корректирующих ляжках
- воздухопроницаемые влагоотводящие материалы с высоким содержанием хлопка
- цвет: бежевый

Показания к применению:

- нарушения осанки
- компрессионные переломы тел позвонков 1-2 степени компрессии
- период реабилитации после сочетанных травм и операций позвоночника
- остеохондроз, спондилез
- грыжи межпозвонковых дисков
- деформация позвоночника (кифозы, сколиозы 1-2 степени)
- болезни Шейермана-Мау, Кальве
- смещение, нестабильность позвонков
- профилактика переломов при остеопорозе
- перед применением проконсультируйтесь со специалистом

Противопоказания:

- абсолютных противопоказаний не выявлено
- относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- сколиоз III-IV степени
- осложнённые травмы позвоночника с повреждением спинного мозга
- необходимость индивидуального ортезирования позвоночника
- наличие в области применения реклинатора контактных дерматитов, трофических язв и пролежней
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие
- относительные противопоказания: индивидуальная непереносимость, гнойничковая инфекция, открытые повреждения кожных покровов, локальные дерматиты различной природы
- применять корректор осанки по назначению и под контролем врача

Рекомендации:

ручная стирка при t 30° С, стирать только с застегнутыми контактными липучками, не тереть и не выжимать изделие, сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов, не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку

Инструкция по применению:

- надевать на нижнее белье, предварительно смоделировав ребра жесткости по фигуре

Правила хранения:

- в помещениях с температурой от 10° до 25° С и относительной влажностью не более 75%
- вдали от источников тепла, пыли и прямых солнечных лучей

Состав:

- хлопок - 37%
- полиамид - 56%
- эластан - 7%


Гарантии:

Гарантий срок - 6 месяцев со дня продажи (при соблюдении рекомендаций по уходу)

Рекомендации по уходу



Как подобрать размер изделия. Инструкция:

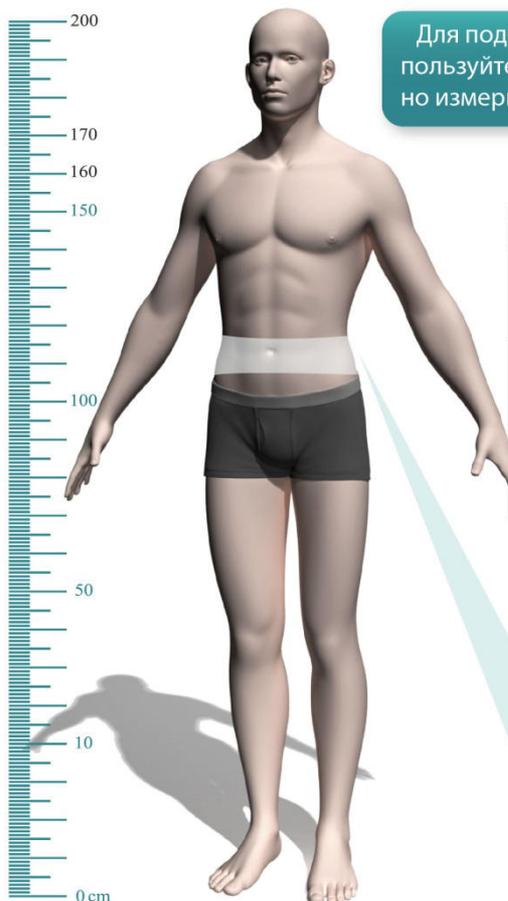

Для подбора необходимого размера изделия воспользуйтесь **размерной таблицей**, предварительно измерив/ уточнив все необходимые параметры

Подбор размера осуществляется для трех ростовок:

подбор по росту:				
рост до 160 см*	SO	MO	LO	XLO
	66-76	74-86	84-96	92-110
рост до 170 см*	S	M	L	XL
	66-76	74-86	84-96	92-110
рост более 170 см*	S1	M1	L1	XL1
	66-76	74-86	84-96	92-110

* сантиметров

Область измерения:

- Измерения производить в области наибольшего обхвата в расслабленном состоянии.
- Если обхват талии пользователя находится на пересечении двух размеров в размерной таблице, рекомендуем выбрать больший размер изделия.

В случае неправильного определения обхвата талии и роста пользователя, производитель не гарантирует полноценную функциональность корсета.