

Ортопедическая подушка для младенцев ТОП-110

Описание:

- конструкция **ортопедической подушки** разработана для правильного развития шейного отдела **позвоночника у маленьких детей**, учитывая их анатомо-физиологические особенности
- **подушка бережно поддерживает голову** и шею ребенка, снижает нагрузку на шейный отдел позвоночника, нормализует мышечный тонус и кровообращение головы и шеи
- подушка способствует хорошему эмоциональному состоянию малыша
- не вызывает аллергии, обладает оптимальным теплообменом, воздухопроницаема, легко стирается, быстро сохнет, сохраняя свои первоначальные свойства и форму, упругая, эластичная, объемная
- габариты подушки: 31×24×6 см

Показания к применению ортопедической подушки:

- профилактика приобретенной **кривошеи**
- в комплексном лечении **врожденной кривошеи**
- предотвращение деформаций затылочной области на ранних стадиях **рахита**
- здоровым детям для правильного развития шейного отдела позвоночника

Противопоказания к применению:

Абсолютных и относительных противопоказаний к применению не выявлено.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению:

- расположить подушку узким валиком под шею ребенка

При возникновении вопросов по применению ортопедической подушки обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- раз в неделю проветривать подушку на свежем воздухе
- стирать подушку по мере загрязнения
- разрешена ручная стирка в теплой воде до 40°C мягкими моющими средствами
- не использовать растворители, отбеливатели и химический метод чистки
- запрещено выжимать и сушить в стиральной машине
- сушить подушку естественным образом на ровной поверхности в хорошо проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов
- не гладить
- избегать воздействия прямых солнечных лучей

Состав:

- наполнитель: **файбер**
- наволочка: хлопок — 100%

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Срок хранения 5 лет.