

medical line




ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

Инструкция по применению
ортопедических изделий

**ОРТЕЗ
С СИСТЕМОЙ ФИКСАЦИИ ВОА
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ**

RKN-381

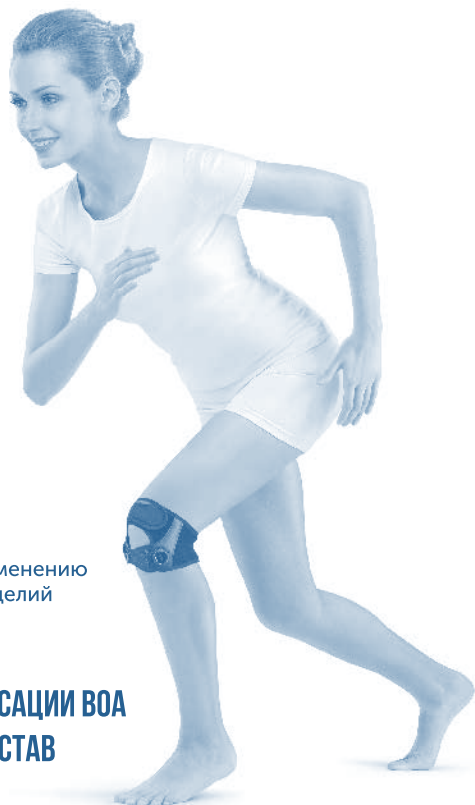

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез ORLETT с системой фиксации BOA на коленный сустав, арт. RKN-381, осуществляет поддержку коленного сустава за счет фиксации сухожилий четырехглавой мышцы бедра; фиксирует ткани коленного сустава в области бугристости большой берцовой кости и стабилизирует коленный сустав.

Компрессионный и массажный эффекты ортеза способствуют ускорению выздоровления.

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Пателлофemorальный болевой синдром.
- Гипермобильность надколенника.
- Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости (болезнь Осгуда-Шляттера).
- Поражения собственной связки надколенника.
- Нестабильность коленного сустава.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач. Для профилактики травм и заболеваний суставов рекомендованный режим: при нагрузках на суставы (спортивных, производственных).

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения ортеза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием ортеза необходимо проконсультироваться с врачом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование ортеза и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

КОНСТРУКЦИЯ

Ортез ORLETT на коленный сустав для фиксации надколенника, арт. RKN-381, состоит из следующих элементов:

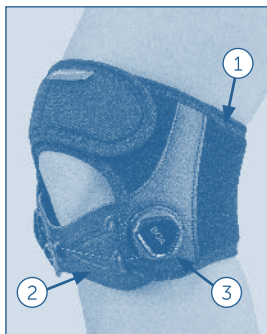

1. Бедренная манжета.
2. Пелот с гелевой вставкой.
3. Система фиксации BOA.


ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Ортез ORLETT, арт. RKN-381, надевается следующим образом: вытянуть вверх застежку BOA, расслабить фиксирующий шнур. Надеть ортез непосредственно на коленный сустав, пелот с гелевой вставкой разместить под надколенником, бедренную манжету плотно закрепить с помощью застежки-липучки. Защелкнуть крышку застежки BOA и, вращая по часовой стрелке, затянуть фиксирующий шнур до необходимого уровня компрессии.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать фиксирующий шнур и бедренную манжету слишком сильно во избежание нарушения кровообращения.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

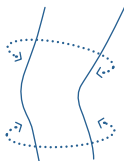

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность бедра на 12 см выше середины коленного сустава и окружность голени на 5 см ниже середины коленного сустава.

Согласно полученным результатам подобрать ортез по таблице подбора размеров. Ортез выпускается в двух версиях — для правой и левой ноги.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	1	2	3	4	5
Окружность бедра на 12 см выше середины коленного сустава, см	30-40	40-45	45-50	50-55	55-60
Окружность голени на 5 см ниже середины коленного сустава, см	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходим регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изделие после 3-5 применений. Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

30% нейлон, 40% полиуретан, 27% полиэстер, 3% сталь.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Ортез должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Ортез утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом.

Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. RKN-381, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Изделия протезно-ортопедические: ортезы на нижние конечности: на коленный сустав: арт. RKN-381.

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 17.12.2021 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

