

## Бандаж при опущении матки Б-637

Основа - хлопчатобумажное трикотажное полотно. Верх - перфорированное эластичное полотно. Съёмный жёсткий аппликатор в области живота и в ластовице. Аппликатор фиксируется на животе двойной эластичной стяжкой. Расстёгивающаяся ластовица. В виде трусов. Для женщин.

Способствует удержанию внутренних органов в физиологически правильном положении за счёт:

- компенсации недостаточного тонуса брюшной стенки и/или мышц тазового дна;
- изменения локальной анатомической геометрии органов;
- создания механического противоупора.

### Воздействие:

- Поддерживает мышечный корсет в естественном положении, чем нормализует внутрибрюшное давление и способствует удержанию органов в физиологичном положении и состоянии

### Показания к применению:

- Опущение внутренних органов
- Опущение матки и стенок влагалища
- Выпадение матки

### Особенности конструкции:

- Съёмный жесткий аппликатор на животе
- Специальная липучка на дополнительной стяжке позволяет самостоятельно регулировать положение стяжек
- Верхняя часть бандажа выполнена из эластичного перфорированного материала, что обеспечивает необходимую степень компрессии
- Плотный съёмный аппликатор в ластовице (8 мм). Ластовица пристегивается крючками к двухрядной застежке
- Состав: 40% хлопок; 35% полиамид; 25% эластан. Аппликаторы - 100% ППУ

### Рекомендации по уходу:

- Рекомендована ручная стирка при температуре 40 С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей
- Не тереть и не выжимать изделие
- После стирки тщательно прополоскать
- Сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света
- Не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку

### Противопоказания:

- Дерматит
- Гнойничковая инфекция
- Индивидуальная непереносимость материалов изделия