

Ортезы серии Care* торговой марки Push — оптимальное решение для защиты и профилактики.

Ортезы Push Care предназначены, в первую очередь, для профилактического применения в случаях физических нагрузок. Эти ортезы успешно защищают человека также в случаях незначительных травм и умеренных нарушениях функции суставов. Отличительной особенностью является легкая степень фиксации и умеренная компрессия.

Продукция Push care является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

* Care – забота

ОРТЕЗЫ НА ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА (8, 10 CM)

PUSH CARE NECK BRACE 8 CM

АРТИКУЛ: 1.60.1

PUSH CARE NECK BRACE 10 CM

АРТИКУЛ: 1.60.2

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Остеохондроз шейного отдела позвоночника с корешковым синдромом.
- Повышенная подвижность шейных позвонков.
- Состояния шейного отдела позвоночника после травм, операций, коррекции смещения шейных позвонков.
- Головные боли, головокружение, гипер- и гипотонус мышц шеи при длительном напряжении мышц шеи (при работе за компьютером, при длительных поездках в транспорте и др.).

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

1. Расположите ортез перед собой строго посередине таким образом, чтобы выемка под подбородок находилась сверху (см. рисунок).
2. Оберните ортез равномерно вокруг шеи и зафиксируйте застежкой «Велкро». Наложённый ортез не должен сдавливать шею и мешать нормальному дыханию.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- При использовании ортеза Push care Neck Brace на шейный отдел позвоночника может потребоваться консультация лечащего врача.
- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза Push care Neck Brace.
- Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию ортеза.
- Проконсультируйтесь у специалиста, если ортез Push care Neck Brace требует индивидуальной подгонки.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push care Neck Brace или при расхождении швов. Не забывайте проверять ортез Push care Neck Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ортезы Push care Neck Brace обеспечивают среднюю фиксацию шейного отдела позвоночника благодаря анатомической форме и применению полужесткого вспененного материала. Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен (система термоконтроля). Ортезы Push care Neck Brace удобны для самостоятельного наложения без посторонней помощи и рассчитаны на регулярный гигиенический уход (стирку).

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к использованию ортеза Push care Neck Brace не выявлено. Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push care Neck Brace. В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.



ПОДБОР РАЗМЕРА

Ортезы Push care Neck Brace на шейный отдел позвоночника отличаются по высоте (арт. 1.60.1 - 8 см и арт. 1.60.2 - 10 см) и производятся в двух значениях длины окружности шеи (27-36 и 36-46 см).

В таблице на упаковке показан размер ортеза.

Необходимая высота ортеза подбирается при надевании: голова фиксируется должным образом в том случае, если она находится в нейтральном положении.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 1.60.1/ 1.60.2

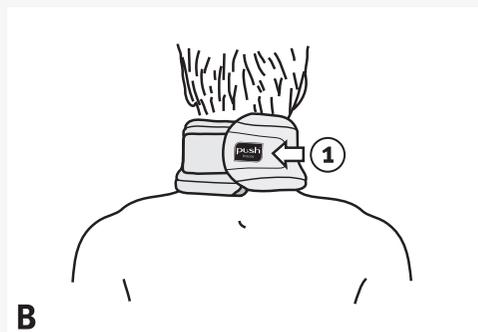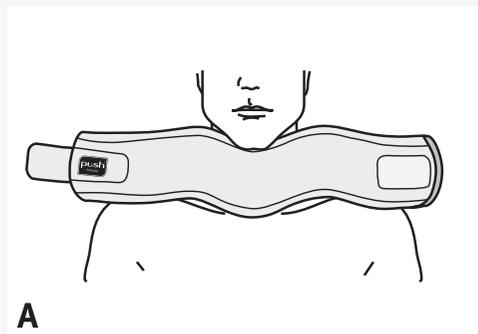

© Nea



1 1036-60 1 / 3

Made in the EU
Designed in the Netherlands

www.push.eu

The Netherlands
6199 AB Maastricht-Alport
Europalaan 31
Nea International Bv



1.60.1/1.60.2



CARE

Ортезы на шейный отдел позвоночника
NECK BRACE



Инструкция по применению



• PY

Артикул 1.60.1/1.60.2

Производитель NEA International BV
(NEA Интернешнл БиВи)
www.push.eu

Импортер ООО «Орто Медикл Групп»
Россия,
143405, Московская область,
г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять Россия,
127220, Москва, а/я № 58,
ООО «НИКАМЕД»
представитель в России и СНГ,
тел.: 8-800-33-33-112,
e-mail: skk@nikamed.ru.

Товар является медицинским изделием
Отпускается без рецепта

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2009/04854 от 25.03.2016 г.
выдано Росздравнадзором,
срок действия не ограничен



Декларация о соответствии
№ РОСС NL.АЯ46.Д72394
(с 04.04.2016 г. по 04.04.2019 г.) выдана ЗАО
«Региональный орган по сертификации и
тестированию»



ПРАВИЛА УХОДА

Чтобы продлить срок службы, после ношения ортез следует просушить. Перед стиркой застегните застежки-липучки «Велкро». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °С. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



СОСТАВ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

1, 2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться в оригинальной упаковке, при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.


УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 1.60.1/ 1.60.2

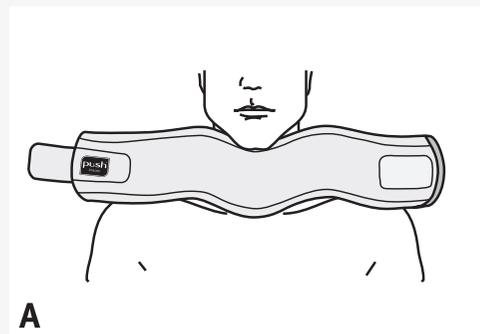

A

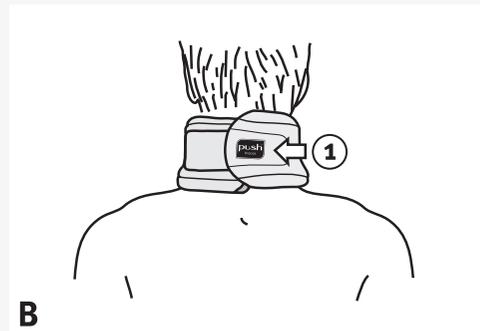

B